

GS 300 általános vizsgálólámpa

A kézikönyv cikkszám: 726202
© 2017 Welch Allyn

Jelmagyarázat

 Lásd a termék kézikönyvét.

 Figyelem! Nagy intenzitású lámpa.


 Beltéri használatra.

 Be-/kikapcsológomb.

 Vigyázat!

 Figyelem!
Hőmérsékleti határértékek

 Páratartalomra vonatkozó határértékek

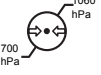 Légnyomásra vonatkozó határértékek

Figyelmeztetések és óvintézkedések

 **VIGYÁZAT!** Fontos, hogy a termék használata előtt elolvassa és megértse a termék használatára vonatkozó utasításokat. A termék használatára vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása a felhasználó, a beteg és/vagy az eszköz sérüléséhez vezethet.

 **VIGYÁZAT!** A robbanásveszély elkerülése érdekében ne használja a terméket gyúlékony anesztetikumok vagy más, levegővel keveredő gyúlékony vegyületek jelenlétében, illetve oxigénben vagy dinitrogén-oxidban dús környezetben.

 **VIGYÁZAT!** A lámpa fényereje nagy. Használat közben ne nézzen a fénybe. Ellenkező esetben károsodhat a szeme. Az optikai sugárzás okozta szemkárosodás veszélyének minimalizálása érdekében ne nézzen nagy fényerejű fényforrásokba és azok visszatükrözött képébe, valamint alkalmazzon szemvédelmet, ha a pupilla összeszűkülésre képtelen vagy a normálistól eltérő méretű.

 **VIGYÁZAT!** A vizsgálólámpát az előírt munkatávolságban kell használni: 50 cm (20 hüvelyk). Ennél kisebb távolság esetén károsodhat a fénynek kitett bőr. Az optikai sugárzás okozta bőrkárosodás veszélyének csökkentése érdekében minimalizálja a vizsgált bőrterületre eső fény intenzitását, a kitettség idejét, valamint tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, ha a bőr érzékenysége szövetkárosodás vagy anesztézia használata miatt megváltozott.

Figyelmeztetések és óvintézkedések (folytatás)

 **VIGYÁZAT!** „A” osztályba sorolt termék. Kórházi vagy rendelői környezetben a termék elektromágneses interferenciát okozhat – ez esetben a felhasználó feladata, hogy megtegye az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket.

 **VIGYÁZAT!** Az eszközt tilos módosítani. Az eszközön végzett bármilyen módosítás a beteg sérülését okozhatja. Az eszközön végzett bármilyen módosítás érvényteleníti a garanciát.

 **FIGYELEM!** A termék javítását kizárólag felhatalmazott Welch Allyn szervizközpontok végezhetik.

 **FIGYELEM!** A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető vagy cserélhető részeket.



 **FIGYELEM!** Kizárólag orvosi rendelőnyyre.

Felhasználási terület

A Welch Allyn GS 300 vizsgálólámpa számos célra használható kórházakban és szakrendelőkben. A termék nem alkalmas diagnózis felállítására vagy sebészi beavatkozásokhoz.

Rögzítés


Asztali/fali tartó

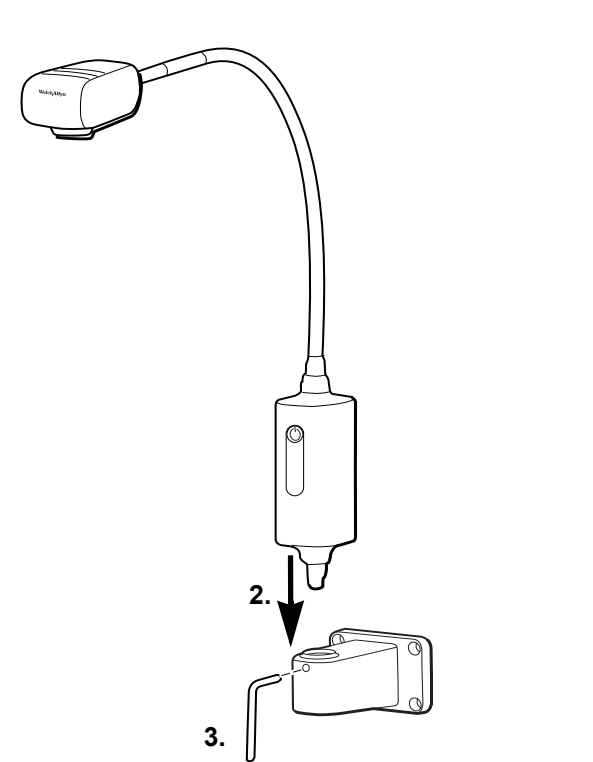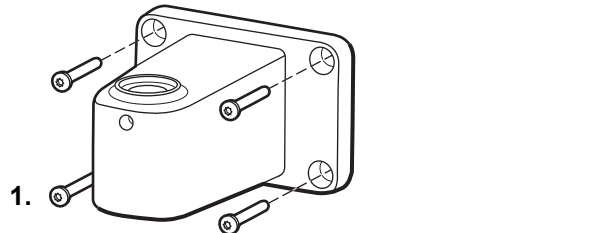


 **VIGYÁZAT!** Győződjön meg arról, hogy a tartókonzol biztosan rögzül-e a falhoz vagy az asztalhoz, illetve hogy a mobilállvány megfelelően van-e összeszerelve, valamint hogy a vizsgálólámpa biztosan rögzül-e a konzolon vagy az állványon. Ne akasszon vagy helyezzen tárgyakat az eszközre.

Összeszerelési útmutató

A mobilállvány összeszerelése

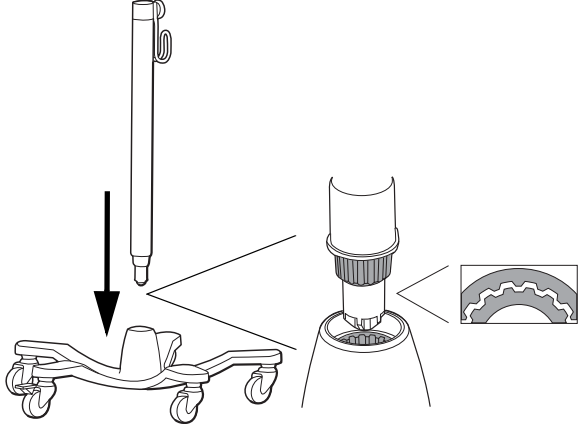

Összeszerelés

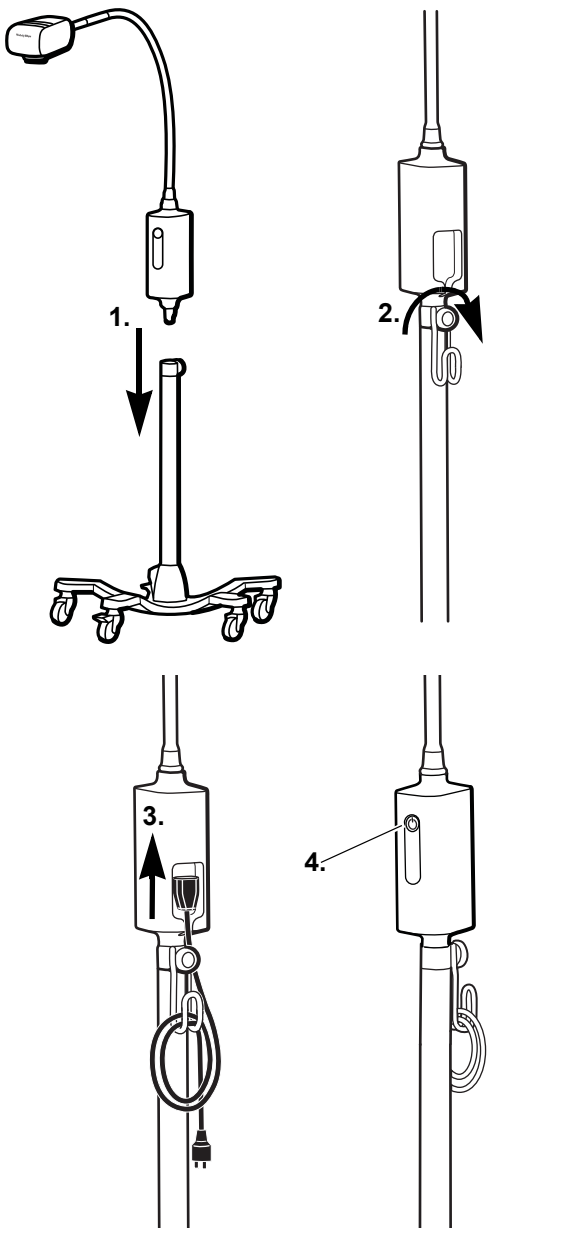

Tisztítás

 **VIGYÁZAT!** Győződjön meg róla, hogy az eszközt kihúzta a fali aljzatból.

Lámpa



A tisztítást enyhe mosószeres meleg vízzel vagy az alábbi oldatok valamelyikével megnedvesített vattapamaccsal végezze:

- 70%-os izopropil-alkohol
- 10%-os fehérítőszer-oldat

Tiszta törölkendővel törölje szárazra.

Hibaelhárítás

	Lehetséges ok	Megoldás
 A zöld fény nem világít	Hibás tápellátás. A lámpa nem kap áramot.	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat.
 A zöld fény világít	A lámpa meghibásodott.	Hívja a Welch Allyn ügyfélszolgálatát.

Garancia

Két év.


Műszaki adatok

Elektromosságra vonatkozó adatok


Bemenet: 100–240 V~ 50–60 Hz, 0,35 A max

Környezetre vonatkozó adatok

Működés:

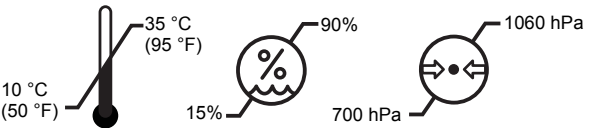

Szállítás/tárolás:

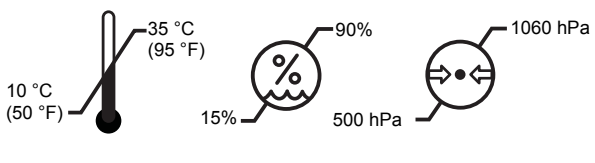

Az eszköz besorolása

I. biztonságossági osztály, folyamatos működés

További műszaki információk

www.welchallyn.com/gsseries

Megfelelőség

IEC 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90, AS/NZS3200



 Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA
www.welchallyn.com

EC REP Regulatory Affairs Representative
Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road
Navan, County Meath, Írország

MEGJEGYZÉS: A termék megfelel minden aktuális, elektromágneses interferenciára vonatkozó szabványnak, így használata nem okozhat zavart más berendezésekben, illetve működését nem zavarhatják más berendezések. Elővigyázatosságból azonban kerülje más berendezések túlzott közelségét.



Szabadalmi szám: US D621,981 S